

Lea todo el prospecto detenidamente: contiene información importante para el consumidor. Este es un producto sanitario que puede adquirirse sin receta médica. Sin embargo, para conseguir una mayor eficacia, se recomienda utilizarlo conforme a las indicaciones descritas.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Para más información o asesoramiento, consulte a su médico y/o farmacéutico.
- Si la sintomatología persiste después de un cierto tiempo, consulte a su médico.

# Cicatridina®

SAL SÓDICA DEL ÁCIDO HIALURÓNICO 5 mg  
óvulos vaginales

## COMPOSICIÓN

Sal sódica de ácido hialurónico, *Centella asiatica*, caléndula, *Aloe vera*, melaleuca, glicéridos semisintéticos, BHT.

## PRESENTACIÓN

CICATRIDINA se presenta en forma de óvulos para uso vaginal. El envase contiene 10 óvulos vaginales de 2 g.

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA

CICATRIDINA óvulos vaginales desempeña su actividad gracias a la presencia de ácido hialurónico, un mucopolisacárido que se encuentra abundantemente distribuido en numerosos tejidos corporales. El ácido hialurónico funciona como un soporte estructural aportando tonicidad, trefismo y elasticidad al tejido. Numerosos estudios clínicos han mostrado la capacidad del ácido hialurónico para acelerar y mejorar el proceso de reepitelización y reparación del tejido.

## INDICACIONES

Tratamiento adyuvante de procesos reparadores en condiciones atróficas y distróficas de la mucosa vaginal. Contribuye a la cicatrización en el posparto, en cirugía ginecológica, en casos de distrofia derivados de quimioterapia, radiación ionizante, sequedad vaginal también debida a deficiencia de estrógenos.

## CUÁNDO NO DEBE UTILIZARSE

No debe utilizarse en caso de hipersensibilidad individual a uno de los componentes del producto.

### *Embarazo y lactancia*

En estas circunstancias, se recomienda que consulte a su médico.

### *Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar instrumental o máquinas*


No son necesarias precauciones especiales.

## INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS

Se desconocen interacciones con otros productos; por lo tanto, se recomienda que consulte a su médico antes de utilizar CICATRIDINA óvulos vaginales junto con otros productos sanitarios o medicamentos de uso vaginal.

## CÓMO UTILIZARLO

Extraiga el óvulo tirando de las dos hojas precortadas del blíster e introdúzcalo profundamente en la vagina. Lavarse las manos antes y después de utilizar el producto sanitario.

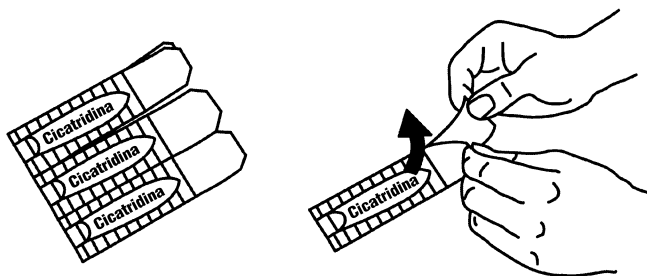

## CUÁNDO Y POR CUÁNTO TIEMPO

Utilice un óvulo al día, preferiblemente por la noche antes de irse a la cama, o según la prescripción médica. La duración del uso depende de la evolución de los síntomas; si es necesario, CICATRIDINA óvulos vaginales puede utilizarse durante períodos prolongados.

## EFFECTOS NO DESEADOS

El empleo de cualquier producto de uso tópico, especialmente si es prolongado, puede causar sensibilización. Si esto ocurre, suspenda el tratamiento y consulte a su médico para iniciar la terapia adecuada. Si observa otros efectos no deseados que no se describen en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

## ADVERTENCIAS

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos. No lo trague.

## CADUCIDAD, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

La fecha de caducidad alude al producto mientras se encuentre en un envase intacto y almacenado correctamente. No utilice el producto después de la fecha de caducidad, ni tampoco en caso de que el envase esté abierto o dañado. Mantenga el producto sanitario alejado de la luz y del calor, preferiblemente a una temperatura de entre 4°C y 25°C. Los productos sanitarios no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los productos sanitarios que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

PRODUCTO SANITARIO  0373

 **Fabricante: FARMA-DERMA s.r.l.**  
Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA (ITALY)

**Distribuidor: LABORATORIOS RUBIÓ S.A.**  
Industria 29, Pol. Ind. Comte de Sert – 08755 Castellbisbal, Barcelona, ESPAÑA

Lea todo el prospecto detenidamente: contiene información importante para el consumidor. Este es un producto sanitario que puede adquirirse sin receta médica. Sin embargo, para conseguir una mayor eficacia, se recomienda utilizarlo conforme a las indicaciones descritas.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Para más información o asesoramiento, consulte a su médico y/o farmacéutico.
- Si la sintomatología persiste después de un cierto tiempo, consulte a su médico.

# Cicatridina<sup>®</sup>

SAL SÓDICA DEL ÁCIDO HIALURÓNICO 5 mg  
supositorios

## COMPOSICIÓN

Sal sódica de ácido hialurónico, *Centella asiatica*, caléndula, *Aloe vera*, melaleuca, glicéridos semisintéticos, BHT.

## PRESENTACIÓN

CICATRIDINA se presenta en forma de supositorios para uso rectal. El envase contiene 10 supositorios de 2 g.

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA

CICATRIDINA supositorios desempeña su actividad gracias a la presencia de ácido hialurónico, un mucopolisacárido que se encuentra abundantemente distribuido en numerosos tejidos corporales. El ácido hialurónico funciona como un soporte estructural aportando tonicidad, trofismo y elasticidad al tejido. Numerosos estudios clínicos han mostrado la capacidad del ácido hialurónico para acelerar y mejorar el proceso de reepitelización y reparación del tejido.

## INDICACIONES

Tratamiento adyuvante de procesos reparadores del canal anorrectal tras cirugía proctológica; hemorroides internas y externas; proctitis; criptitis; rágades anales; fisuras; fístulas perianales.

## CUÁNDO NO DEBE UTILIZARSE

No debe utilizarse en caso de hipersensibilidad individual a uno de los componentes del producto.

### *Embarazo y lactancia*

En estas circunstancias, se recomienda que consulte a su médico.

### *Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar instrumental o máquinas*


No son necesarias precauciones especiales.

## INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS

Se desconocen interacciones con otros productos; por lo tanto, se recomienda que consulte a su médico antes de utilizar CICATRIDINA supositorios junto con otros productos sanitarios o medicamentos de uso rectal.

## CÓMO UTILIZARLO

Extraiga el supositorio tirando de las dos hojas precortadas del blíster. Introducir el supositorio en el recto. Lavarse las manos antes y después de utilizar el producto sanitario.

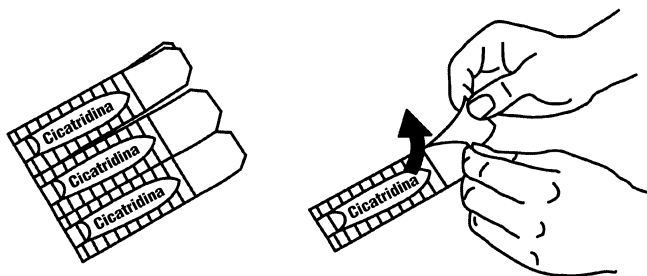

## CUÁNDO Y POR CUÁNTO TIEMPO

Utilice un supositorio al día, preferiblemente por la noche antes de irse a la cama, o según la prescripción médica. La duración del uso depende de la evolución de los síntomas; si es necesario, CICATRIDINA supositorios puede utilizarse durante períodos prolongados.

## EFFECTOS NO DESEADOS

El empleo de cualquier producto de uso tópico, especialmente si es prolongado, puede causar sensibilización. Si esto ocurre, suspenda el tratamiento y consulte a su médico para iniciar la terapia adecuada. Si se producen otros efectos no deseados, informe a su médico o farmacéutico.

## ADVERTENCIAS

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos. No lo trague.

## CADUCIDAD, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

La fecha de caducidad alude al producto mientras se encuentre en un envase intacto y almacenado correctamente. No utilice el producto después de la fecha de caducidad ni tampoco en caso de que el envase esté abierto o dañado. Mantenga el producto sanitario alejado de la luz y del calor, preferiblemente a una temperatura de entre 4°C y 25°C. Los productos sanitarios no se deben tirar por los desagües ni a la basura; pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los productos sanitarios que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

PRODUCTO SANITARIO  0373

 **Fabricante: FARMA-DERMA s.r.l.**  
Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA (ITALY)

**Distribuidor: LABORATORIOS RUBIÓ S.A.**  
Industria 29, Pol. Ind. Comte de Sert – 08755 Castellbisbal, Barcelona, ESPAÑA